

# Mluvící váha Phoenix (německá)

---

## Návod k obsluze

Srdečně Vám blahopřejeme k zakoupení váhy *My Weigh Phoenix*. Stali jste se tak majitelem přístroje s vynikajícími technickými vlastnostmi. Přejeme Vám spoustu radosti z Vašeho nového přístroje. Více informací můžete najít na [www.myweigh.com](http://www.myweigh.com).

## Funkce

Zprostředkování tělesné hmotnosti za pomoci hlasového výstupu.

## Technické údaje

Kapacita: 150 kg

Minimální hmotnost: 2 kg

Přesnost na:  $\pm 0,1$  kg

Odchylka:  $\pm (1 \% + 1d)$

Optimální provozní teplota:  $20\text{ °C} \pm 15\text{ °C}$

## Návod k obsluze

### Baterie

Vložte jednu 9V baterii na spodní straně přístroje.

### Vážení

1. Vstupte na váhu. Přístroj Vás přivítá hlášením „Hallo, guten Tag“. Sestupte opět z váhy a chvíli vyčkejte.
2. Až bude přístroj připraven, ozve se hláška „Ich bin bereit“. Na displeji se ukáže „0,0“. Můžete vstoupit na váhu. Přístroj zobrazí Vaši hmotnost na displeji a zřetelně a hlasitě ji oznámí.
3. Nyní můžete sestoupit z váhy. Údaj setrvá na displeji po zhruba 10 sekund. Poté zahlásí „Auf Wiedersehen“ a automaticky se vypne.

### Vypnutí

Přístroj se vypíná automaticky po 10 sekundách od zvážení.

### Hlasový výstup

Pomocí přepínače na spodní straně váhy můžete hlasový výstup zapnout a vypnout.

### Důležitá upozornění

- Budete-li mít pocit, že přístroj pracuje nepřesně, zkuste nejprve vyměnit baterii.
- Při prázdné baterii se na displeji zobrazí příslušný symbol.

- Při překročení povolené hmotnosti se na displeji zobrazí „FFFF“. Okamžitě sestupte z váhy.
- Používejte přístroj pouze na tvrdých, rovných a suchých površích, ne na koberci.
- Vyvarujte se horku a vlhku. Váhu čistěte vlhkým hadříkem.
- Zabraňte úderům a vibracím.
- Pokud přístroj nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterii.
- Nerozebírejte přístroj, přišli byste tak o možnost záruky.
- Přístroj je určen pouze pro osobní potřebu.